

Estudio *CAR* del hospital *Mass General*: Contactos de la familia en riesgo de contraer la COVID-19

Instrucciones para la recolección de saliva en niños menores de 3 años

Dedique un momento para leer por completo estas instrucciones antes de comenzar.

El estuche de recolección de saliva debe contener un hisopo dentro de un tubo de plástico y un recipiente pequeño de plástico con tapa azul que lleva una etiqueta en el lado. (Figura 1)



Figura 1

Instrucciones para recolectar la muestra:

1. Saque el hisopo del tubo de plástico.

No ponga el hisopo en ningún sitio ni toque ninguna superficie con él.

2. Deseche en la basura el tubo de plástico en que venía el hisopo.
3. Pídale al niño que saque la lengua de modo que usted pueda ver los dos tercios de la parte anterior. (Figura 2)
4. Frótle la parte superior de la lengua con suavidad y firmeza con el hisopo, de atrás hacia delante. (Figura 3)

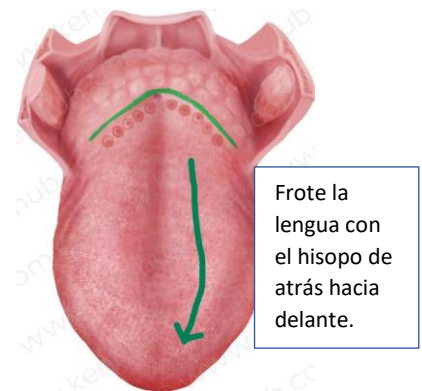


Figura 2

El hisopo debe recorrer aproximadamente dos tercios del largo de la lengua.

5. Retire la tapa azul del recipiente pequeño de plástico, que podría contener un líquido o una esponja.
6. Coloque el hisopo dentro del recipiente.
7. Presione la varita del hisopo contra el lado del recipiente para romper el extremo sobrante.
8. Tire en la basura el extremo sobrante de la varita.
9. Cierre el recipiente con la tapa y apriétela bien.
10. Escriba el nombre y la fecha de nacimiento del niño en la etiqueta.
11. Escriba la fecha y hora de recolección de la muestra en la etiqueta.
12. Continúe con las instrucciones de empaque y envío que se le proporcionaron por separado.

Figura 3



Frote la lengua con el hisopo de atrás hacia delante.

Asegúrese de frotar con el hisopo dos tercios del largo de la lengua.

Si tiene preguntas después de leer estas instrucciones, llame a Laura Melo al (617) 726-3864 o escriba a carstudy@mgh.harvard.edu.